

Kit de Auto Detect Aptima (sistema Panther™)

Para uso diagnóstico *in vitro*.

Uso previsto

El kit de Auto Detect Aptima está indicado para utilizarse en el sistema Panther.

Materiales suministrados

Nota: Para obtener información sobre cualquier aviso de riesgo o precaución que pueda estar asociado a los reactivos, consulte la Biblioteca de hojas de datos de seguridad (Safety Data Sheet Library) en www.hologic.com/sds.

Kit de Auto Detect Aptima (núm. de catálogo 303013)

(Almacenar a una temperatura entre 15 °C y 30 °C al recibirlo)

Símbolo	Componente	Cantidad
R1	Auto Detect 1 Aptima <i>Solución acuosa con peróxido de hidrógeno al 0,1% y ácido nítrico 0,001 N.</i>	1 x 245 mL
R2	Auto Detect 2 Aptima <i>Hidróxido de sodio 1,6 N.</i>	1 x 245 mL

Advertencias y precauciones

- Evite el contacto de Auto Detect 1 y Auto Detect 2 con la piel, los ojos y las mucosas. Si estos fluidos entran en contacto con la piel o los ojos, lávelos con agua. Si se produce un derrame de estos fluidos, diluya el derrame con agua antes de secarlo.
- Tome las precauciones habituales del laboratorio.

Requisitos de almacenamiento y manipulación

- Almacene el kit de Auto Detect Aptima a una temperatura entre 15 °C y 30 °C.
- Los fluidos deben estar a una temperatura entre 15 °C y 30 °C antes de utilizarse. Una vez abiertos, los fluidos son estables durante 60 días.
- Si se ha formado precipitado, caliente los fluidos a una temperatura entre 37 °C y 60 °C para facilitar la disolución del precipitado. Enfríe los fluidos a temperatura ambiente y mézclelos a fondo antes de utilizarlos.
- No los utilice después de la fecha de vencimiento.

Procedimiento

Sustituya las botellas en el cajón de fluidos universales cuando se lo indique el sistema. Consulte el *Panther System Operator's Manual* (Manual del usuario del sistema Panther).



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Asistencia al cliente: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customerservice@hologic.com

Asistencia técnica: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Para obtener más información, visite www.hologic.com.

Hologic, Aptima, y Panther son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc. y/o de sus subsidiarias en los Estados Unidos y/o en otros países.

Todas las demás marcas comerciales que puedan aparecer en este prospecto pertenecen a de sus respectivos propietarios.

©2001–2017 Hologic, Inc. Reservados todos los derechos.

502180ES Rev. 002
2017-04