

**Kit de fluidos do ensaio Aptima (sistema Panther™)**

Para utilização no diagnóstico *in vitro*.

**Utilização prevista**

O kit de fluidos do ensaio Aptima destina-se a ser utilizado no sistema Panther.

**Materiais fornecidos**

**Nota:** Para obter informações sobre quaisquer declarações de perigo e de precaução que possam estar associadas a estes reagentes, consulte a Biblioteca de fichas de dados de segurança (Safety Data Sheet Library) em [www.hologic.com/sds](http://www.hologic.com/sds).

**Kit de fluidos do ensaio Aptima (n.º de cat. 303014)**

(Conservar a uma temperatura entre 15 °C e 30 °C após a recepção)

Símbolo	Componente	Quantidade
W	Solução de lavagem Aptima <i>Solução tamponada HEPES 10 mM contendo menos de 2% de conservante.</i>	1 x 2,9 L
O	Reagente óleo Aptima <i>Óleo de silicone.</i>	1 x 260 mL
DF	Tampão para o fluido de desactivação Aptima <i>Solução tamponada de bicarbonato 800 mM.</i>	1 x 1,4 L

**Advertências e precauções**

- A. Utilize as precauções laboratoriais habituais.
- B. Evite a contaminação microbiana e com ribonuclease dos fluidos do ensaio Aptima.

**Requisitos de conservação e manuseamento**

- A. Conservar os fluidos do ensaio Aptima a uma temperatura de 15 °C a 30 °C.
- B. Depois de abertos, os fluidos do ensaio Aptima mantêm-se estáveis durante 60 dias.
- C. Não utilize após o fim do prazo de validade.

**Procedimento**

Substitua os frascos na gaveta de fluidos universais quando tal for solicitado pelo sistema. Consulte o *Panther System Operator's Manual* (Manual do Operador do Sistema Panther).



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 EUA

**Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Apoio ao Cliente: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)  
customersupport@hologic.com

Suporte técnico: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

Para obter mais informações sobre contactos, aceda a [www.hologic.com](http://www.hologic.com).

Hologic, Aptima, e Panther são marcas comerciais e/ou marcas registadas da Hologic, Inc. e/ou respectivas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países. Quaisquer outras marcas comerciais que possam aparecer neste folheto informativo pertencem aos respectivos proprietários.

©2001–2017 Hologic, Inc. Todos os direitos reservados.

502181PT Rev. 002  
2017-04