

MTD Amplification Controls

Pouze Pro Export

(bioMérieux ref. 39223 / Hologic Cat. No. 301043F)

POUŽITÍ

Činidla v přípravku Hologic MTD Amplification Controls lze použít jako dodatečné kontroly k testu Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD).

POSKYTNUTÁ ČINIDLA A MATERIÁL

Poznámka: Informace o H-větvích a P-větvích, které mohou být spojeny s reagensy, naleznete v knihovně bezpečnostních listů (Safety Data Sheet Library) na adrese www.hologic.com/sds.

MTD Amplification Negative Control (NC) 2 x 1 mL
Pufrovaný roztok.

MTD Amplification Positive Control (PC) 2 x 1 mL
Neinfekční nukleová kyselina v pufrovaném roztoku.

VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ

- A. Pro diagnostické použití in vitro.
- B. MTD Amplification Controls lze použít spolu s Testem Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD).
- C. MTD Amplification Controls nemonitoruje sonikační (lytický) krok stanovení.
- D. Oddíl Postup testu v příbalovém letáku vyžaduje k monitorování jak lžycy, tak amplifikace buněčné kontroly.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ PŘÍPRAVKU A ZACHÁZENÍ S NÍM

Činidla obsažená v MTD Amplification Controls se musí skladovat při teplotě 2 °C až 8 °C, přičemž jsou stabilní do data vyznačeného na nádobkách.

POSTUP

Viz odstavec Amplifikace oddílu POSTUP TESTU v příbalovém letáku Testu Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD).

1. Na dno amplifikační zkumavky obsahující 50 µL rekonstituovaného Mycobacterium Tuberculosis Amplification Reagent a 200 µL Oil Reagent přidejte 25 µL Mycobacterium Amplification Negative Control nebo Mycobacterium Amplification Positive Control.
2. Pokračujte ve stanovení podle oddílu Amplifikace, krok 4, příbalového letáku testu Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD).

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY

	RLU
Amplifikační negativní kontrola	< 20,000
Amplifikační pozitivní kontrola	≥ 500,000



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Podpora zákazníků: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Technická podpora: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Další kontaktní informace naleznete na www.hologic.com.

Hologic and Amplified MTD jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Hologic, Inc. nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech amerických nebo v jiných zemích.

Všechny ostatní ochranné známky, které se mohou objevit v tomto příbalovém letáku, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

AW-12602-2601 Rev 002 (CS)
©1990 - 2017 Hologic, Inc. Všechna práva vyhrazena.
2017-05