

Aptima Auto Detect Kit

För *in vitro*-diagnostiskt bruk.

Avsedd användning

Aptima Autodetekteringskits ska användas med Leader™ HC+ luminometer och Tigris™ instrumentsystem.

Tillhandahållen materiel

Anteckning: Information om uttalanden om eventuella risker och försiktighetsåtgärder som kan förekomma i samband med reagenser finns i *Safety Data Sheet Library* (bibliotek med säkerhetsdatablad) på www.hologic.com/sds.

Aptima Autodetekteringskits – Artikelnr 1048

Symbol	Komponent	Beskrivning	Antal
R1	Aptima Auto Detect 1	Vattenlösning innehållande 0,1 % väteperoxid och har salpetersyrakoncentrationen 0,001 mol/L	1 x 245 mL
R2	Aptima Auto Detect 2	Natriumhydroxidkoncentrationen 1,6 mol/L	1 x 245 mL

Varningar och försiktighetsåtgärder

- A. För *in vitro*-diagnostiskt bruk.**
- B. Undvik hud-, ögon och slemhinnekontakt med Auto Detect 1 och Auto Detect 2. Tvätta med vatten om dessa vätskor kommer i kontakt med huden eller ögonen. Om dessa vätskor spills, ska spillet spädas ut med vatten och sedan torkas upp. Iaktta sedvanliga säkerhetsrutiner för laboratorier.

Förvaring och hantering

Vätskorna i Aptima Auto Detect-SATS ska förvaras vid 15 – 30 °C. Om vätskorna fryser under transport eller vid förvaring kan en utfällning bildas. Uppvärmning av vätskor till 37 – 60 °C underlättar upplösning av utfällningen. Om uppvärmning krävs ska vätskorna få svalna till rumstemperatur och blandas ordentligt före användning. Vätskor måste ha temperaturen 18 – 28 °C före användning med Leader HC+ luminometer och 15 – 30 °C före användning med Tigris-systemet.

Förfarande

- Avlägsna de befintliga Auto Detect 2-flaskorna.
- Installera de nya Auto Detect 2-flaskorna i instrumentet såsom beskrivs i respektive instruments användarhandbok.

Metodanmärkningar

- Se till att instrumentet flödas med Auto Detect före användning.
- Tänkbara felkällor inkluderar användarfel vid installation av flaskor eller användning av utgångna Auto Detect 1 eller Auto Detect 2.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Kundsupport: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Teknisk support: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Besök www.hologic.com för ytterligare kontaktinformation.



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

©2001-2017 Hologic, Inc. Med ensamrätt.

IN0055-01-SV Rev. 002
2017-04